


### 1-PRESENTACIÓN

Esta guía le mostrara como configurar y llevar a cabo con éxito la grabación de un electrocardiograma.

### 2-COMIENZE CON ESTO

- Limpieza del area
- Conecte el cable al paciente

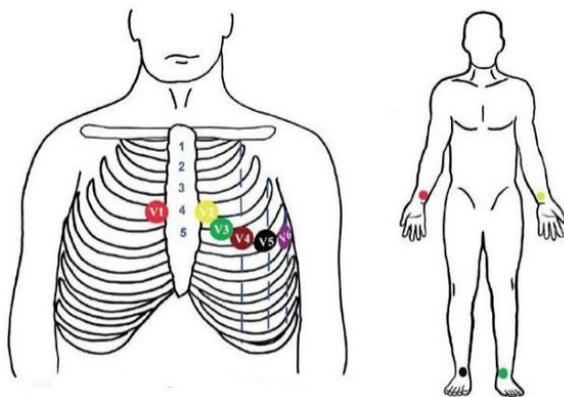

**C1 V1:** en el 4° espacio intercostal sobre la paraesternal derecha.

**C2 V2:** en el 4° espacio intercostal sobre la paraesternal izquierda.

**C3 V3:** en el 5° costilla, entre V2 y V4.

**C4 V4:** en el 5° espacio intercostal sobre la hemiclavia izquierda.

**C5 V5:** en la axila anterior izquierda, en el mismo nivel que V4.

**C6 V6:** en la axila media izquierda, en el mismo nivel que V4.

**Electrodos periféricos:** generalmente se colocan algunos centímetros por encima de los tobillos y muñecas.

### 3-CONFIGURACIÓN

#### DISPOSITIVO EN BLUETOOTH

- El técnico debe dejar emparejado el dispositivo con el PC.
- Debe ser programado para cada paciente.
- Conecte el dispositivo al PC usando el formato digital.

### 4-SOFTWARE

- Abrir aplicación **PIT MOBILE ECG** instalada previamente.



### 5-INSTALACIÓN DE LAS PILAS


- Siempre utilice las pilas nuevas.
- Después de colocar las pilas, la pantalla LCD se iluminara y mostrara la versión del software.





### 6- PREPARACIÓN DEL EQUIPO

- Conecte correctamente el cable según marcas.

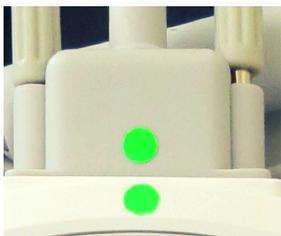


- Presione el botón **ON/OFF** durante 2 segundos.



- Para iniciar la grabación, mantenga presionado el botón **STAR**.




- Una vez finalizado el examen aparecerá en la pantalla una carpeta indicando que se encuentra el examen disponible para enviar.

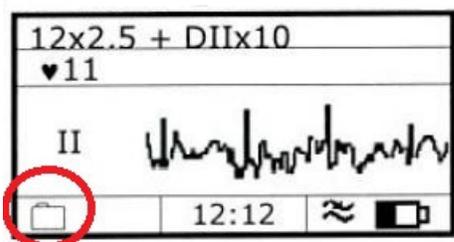

- Para enviar la grabación, mantenga presionado el botón **LINK**.

### 7- OBTENCIÓN Y ENVIÓ DE DATOS

- Conectar el dispositivo al PC usando el formato digital.
- Verificar conexión entre dispositivo y PC.
- Abrir el software. Al desplegarse la ventana **PIT MOBILE ECG**.
- Una vez abierta, hacer click en "**ECG**".
- Haga click en "**Adquirir Exámenes**".

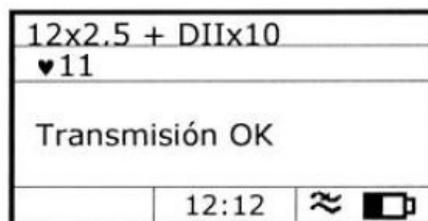

- Luego de ser adquirido el examen, complete los datos del paciente que solicita el programa. El formato de RUT debe ser 12345678-9.
- Luego, al presionar el botón "Enviar", aparecerá en color verde el botón **CONTINUAR**, que finalmente nos indica que el examen fue recibido.
- Si el envío es exitoso aparecerá un cuadro de dialogo con el **Numero de Folio**.